



NA CITLIVÉ
MATERIÁLY



ÚČINNÝ BĚHEM 1 MINUTY

TESTOVANÁ VYNIKAJÍCÍ
MATERIÁLOVÁ KOMPATIBILITA

Meliseptol® Foam pure

RYCHLÁ PĚNOVÁ DEZINFEKCE
CITLIVÝCH POVRCHŮ



Meliseptol® Foam pure

RYCHLÁ PĚNOVÁ DEZINFEKCE CITLIVÝCH POVRCHŮ



Přípravek je vhodný i pro zdravotnické prostředky s citlivými povrchy, jako jsou vybavení operačních sálů, příslušenství ultrazvukových přístrojů, infuzní pumpy, speciální nemocniční lůžka, zubařská křesla, povrchy z umělé kůže v nemocnicích a ordinacích.

VLASTNOSTI:

- Rychlá a efektivní dezinfekce
- Testovaná vynikající materiálová kompatibilita
- K okamžitému použití
- Nízký obsah alkoholu
- Nevytváří aerosol
- Bez parfemace
- Doporučuje se pro čištění a dezinfekci přístrojů Perfusor® Space a Infusomat® Space
- Vhodný do B. Braun Wipes zásobních systémů
- Použitelnost systému 4 týdny

SLOŽENÍ:

100 g přípravku obsahuje:
1-propanol 17 g; didecyldimethylamoniumchlorid 0,23 g;
neionogenní tensidy < 5%; purifikovaná voda

NÁVOD K POUŽITÍ

- Elektrické přístroje vypněte, odpojte od proudu.
- Naneste Meliseptol® Foam pure v dostatečném množství a rozetřete přípravek na celý povrch tak, aby byl dostatečně smočen, nechte zaschnout. Vyčkejte uplynutí doporučené expozice. Těžko dostupné oblasti lze pouze postříkat přípravkem Meliseptol® Foam pure. Nestříkejte přípravek do otvorů na zařízeních.
- Vizuálně čisté povrchy jsou takto čištěny a dezinfikovány v jednom kroku.
- V případě viditelné kontaminace je třeba provést postup ve dvou krocích:
 - a) nejprve odstraňte kontaminaci ubrouskem na jedno použití nasáklým přípravkem Meliseptol® Foam pure
 - b) poté proveďte dezinfekci dalším nanesením přípravku a jeho rozetřením novým ubrouskem.
- Před použitím zařízení nechte povrch zcela uschnout

VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ ÚČINNOSTI:

Účinnost	Metoda	Expozice
Baktericidná, levurocidní, obalené viry (vč. HBV, HCV, HIV, Vaccinia), rotavirus	DGHM/VAH, EN 13727, EN 13624, EN 13697, EN 14476, EN 16615, DVV/RKI	1 min
Tuberkulocidní	EN 14563	1 min
	EN 14348	3 min
Virus ptačí chřipky typu A	EN 14476	15 s
MNV	EN 14476	5 min
Polyomavirus	DVV/RKI*	5 min

Meliseptol® Foam pure	Katalog. č.
Láhev s aplikátorem pěny 750 ml	19797
Kanýstr 5 l	19289

Upozornění: Používejte dezinfekční prostředek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte informace o přípravku na etiketě nebo na informačním listu.

MATERIÁLOVÁ KOMPATIBILITA OVĚŘENA:

- Akrylátová skla, Makrolon
- Latex, guma, silikon, koženka
- Ultrazvukové sondy zn. Philips, Hitachi, ALOKA
- Konzole zn. GE
- Inkubátory
- Věže na operačních sálech
- Klávesnice, myši, monitory a další příslušenství
- Perfusor® Space a Infusomat® Space

B. Braun Medical s.r.o. | Divize OPM | V Parku 2335/20 | 148 00 Praha 4 | Česká republika
Tel. +420-271 091 111 | info@bbraun.cz | www.bbraun.cz

*
DVV – Německá společnost pro virová onemocnění
RKI – Institut Roberta Kocha, Německo
DGHM – Německá Společnost pro hygienu a mikrobiologii
VAH – Společnost aplikované hygieny