

PLNĚ VIRUCIDNÍ



ŠIROKÉ SPEKTRUM
ÚČINNOSTI BĚHEM
1 MINUTY

BEZ OBSAHU ALDEHYDŮ
A ALKYLAMINŮ

NA NEINVAZIVNÍ
ZDRAVOTNICKÉ
PROSTŘEDKY

Meliseptol® HBV ubrousky

DEZINFEKČNÍ UBROUSKY



Meliseptol® HBV ubrousky

DEZINFEKČNÍ UBROUSKY



Širokospektrý dezinfekční prostředek na vyšetřovací křesla, pracovní plochy nebo vybavení operačních sálů ve formě ubrousků napuštěných přípravkem Meliseptol® rapid.

VLASTNOSTI:

- Praktické balení v zásobníku s možností doplňování
- Pevný „klik-klak“ uzávěr brání vysychání náplně
- Mimořádně rychlý účinek: během 1 minuty
Pevné ubrousky jsou napuštěny přípravkem Meliseptol® rapid
- Široké spektrum účinnosti: baktericidní, účinný na obalené i neobalené viry, tuberkulocidní, fungicidní, sporicidní
- Bez obsahu aldehydů a alkylaminů
- Meliseptol® rapid zalistován v seznamech DGHM/VAH, IHO-viruzide*
- Dermatologicky testován
- Použitelnost od otevření 90 dní

SLOŽENÍ:

Balení obsahuje 100 ubrousků napuštěných 211 g přípravku Meliseptol® rapid.

100 g roztoku obsahuje: 50,0 g Propan-1-olu,

0,075 g didecyldimethylamoniumchloridu

Pomocné látky: < 5% neionogenních tensidů, parfém, purifikovaná voda

NÁVOD K POUŽITÍ

Povrch otírejte napuštěným ubrouskem tak, aby byl celý smočený a nechte působit. Neotírejte do sucha, nechte zaschnout! Před použitím na povrchy z materiálů citlivých vůči alkoholům vyzkoušejte jejich kompatibilitu s Meliseptolem® rapid. Neotírejte horké povrchy nebo zapojená elektrická zařízení.

VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ ÚČINNOSTI:

Účinnost	Metoda	Expozice
Baktericidní, levurocidní	EN 13727, EN 13624, EN 13697, EN 16615	1 min
Mykobaktericidní	EN 14348	1 min
Tuberkulocidní	EN 14348	30 s
Plísň (A. brasiliensis)	EN 14562	15 min
Obalené viry (vč. HBV, HCV, HIV, Vaccinia virus, BVDV)	DVV/RKI*	30 s
Omezeně virucidní (Adeno + MNV)	EN 14476	1 min
Plně virucidní (Adeno + MNV + Polio**)	EN 14476 F2/S2**	10 min
Rotavirus	DVV/RKI*	1 min
Virus ptačí chřipky typu A	DVV/RKI* odp. EN 14476	15 s

** Poliovirus testován podle připravované metody F2/S2

Meliseptol® HBV ubrousky	Katalog. č.
Zásobní box s náplní, 100 ubrousků	19096
Náhradní náplň, 100 ubrousků	19097

Upozornění: Používejte dezinfekční prostředek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte informace o přípravku na etiketě nebo na informačním listu.

B. Braun Medical s.r.o. | Divize OPM | V Parku 2335/20 | 148 00 Praha 4 | Česká republika
Tel. +420-271 091 111 | info@bbraun.cz | www.bbraun.cz

*

DVV – Německá společnost pro virová onemocnění

RKI – Institut Roberta Kocha, Německo

DGHM – Německá Společnost pro hygienu a mikrobiologii

VAH – Společnost aplikované hygieny

IHO – virucide-liste.de

T0130MCZ

2019-05-03