



ŠIROKOSPEKTRÝ  
DEZINFEKČNÍ PŘÍPRAVEK  
BEZ OBSAHU ALDEHYDŮ  
S VYNIKAJÍCÍ ČISTÍCÍ  
SCHOPNOSTÍ

# Hexaquart® XL

DEZINFEKCE PLOCH A POVRCHŮ

# Hexaquart® XL

## PŘÍPRAVEK PRO DEZINFEKCI PODLAH A POVRCHŮ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ V PROSTORÁCH S VYSOKÝM HYGIENICKÝMI NÁROKY



Hexaquart® XL je kapalný koncentrovaný, vodou ředitelný dezinfekční prostředek na bázi kombinovaného účinku antimikrobiálně účinného aminu a kvarterních amoniových sloučenin s obsahem speciálních čistících složek. Vhodný pro použití ve zdravotnictví, komunální hygieně, balneo provozech, stravovacích zařízeních apod.

### VLASTNOSTI:

- Široké spektrum účinnosti včetně TBc
- Rychlý účinek
- Velmi dobrá materiálová kompatibilita (akrylátová skla, kov, elastomery)
- Příjemná vůně
- Vhodný do zásobních systémů utěrek B. Braun Wipes
- Zalistován v seznamech VAH, IHO\*

### SLOŽENÍ:

100 g přípravku obsahuje:  
9,9 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diaminu,  
6,0 g didecyldimethylamoniumchloridu,  
< 5% neionogenních tenzidů, komplexotvorná činidla,  
parfém, inhibitor koroze, barvivo, rozpouštědlo

### NÁVOD K POUŽITÍ

Odměřené množství koncentráту Hexaquart® XL vždy přídávejte do studené vody (max 25°C). Přípravek nemíchejte s aldehydy. Naředěným pracovním roztokem otřete povrch tak, aby byl zcela smočen, nechte zaschnout. Neutírejte do sucha. Pomocný roztok v systému utěrek B. Braun má trvanlivost 4 týdny od naředění. Není určen na invazivní zdravotnické prostředky.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Obaly je po vypláchnutí možno spalovat v zařízeních k tomu určených nebo recyklovat.

### VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ ÚČINNOSTI:

Účinnost	Metoda	Konc.	Expozice
Baktericidní	EN 13727,	2,0%	5 min
Levurocidní	EN 13624,	1,0%	15 min
	EN 16615,	0,5%	30 min
	EN 13697		
Tuberkulocidní	EN14348	2,0%	15 min
Mykobaktericidní		1,0%	60 min
Omezeně virucidní	EN 14476	1,0%	5 min
	DVV/RKI*	0,5%	5 min
Omezeně virucidní PLUS	EN 14476	2,0%	60 min
Rotavirus	EN 14476	1,0%	5 min

Hexaquart® XL	Katalog. č.
Láhev 1 000 ml	180026
Kanistr 5 l	180027

**Upozornění:** Používejte dezinfekční prostředek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte informace o přípravku na etiketě nebo na informačním listu.

B. Braun Medical s.r.o. | Divize OPM | V Parku 2335/20 | 148 00 Praha 4 | Česká republika  
Tel. +420-271 091 111 | info@bbraun.cz | www.bbraun.cz

\*  
VAH – Společnost aplikované hygieny  
IHO – Německá průmyslová asociace pro hygienu a ochranu povrchů  
DVV – Německá společnost pro virová onemocnění  
RKI – Institut Roberta Kocha, Německo