



## Incidin Dry Wipes system

- Praktický systém jednorázových utierok **Incidin Dry Wipes Premium** a zásobníka **Incidin Dry Wipes Dispenser**
- Vysokokvalitné utierky pre použitie s produktmi spoločnosti Ecolab. Rozmer utierky 20×38cm.
- Určené pre dezinfekciu malých povrchov, predmetov a prístrojov
- Stabilita dezinfekčného prostriedku laboratórne testovaná. Použitie navlhčených utierok až 4 týždne

### Produkty testované pre použitie s Incidin Dry Wipes system

Incidin foam  
Incidin liquid  
Incidin Extra N  
Incidin Plus  
Incidin Rapid  
Incidin Pro

### Použitie systému Incidin Dry Wipes

1. Nasadíme si gumené rukavice
2. Do vedierka vložíme rolku utierok a povytiahneme prvú utierku zo stredy rolky
3. Zalejeme utierky pracovným roztokom resp.koncentrátom v objeme 2,5 l
4. Pretiahneme prvú utierku cez viečko vedierka, ktoré následne nasadíme
5. Vedro označíme nálepkou s údajom o prípravku, koncentrácii, expirácii a dátumom riedenia.
6. Necháme utierky nasiaknuť dezinfekčným prípravkom po dobu 30-60min
7. Po nasiaknutí sú utierky pripravené na použitie po dobu 4 týždňov

### Pracovné koncentrácie testovaných prípravkov :

Dezinfekčný prípravok	Koncentrácia	Kontaktný čas	
Incidin foam	koncentrovaný	5 min	čisté aj zaťažené podmienky
Incidin liquid	koncentrovaný	5 min	čisté aj zaťažené podmienky
Incidin Extra N	0,50%	1 hod	čisté aj zaťažené podmienky
Incidin Extra N	1,00%	30 min	čisté aj zaťažené podmienky
Incidin Extra N	2,00%	15 min	čisté aj zaťažené podmienky
Incidin Plus	0,50%	1 hod	čisté aj zaťažené podmienky
Incidin Plus	1,00%	30 min	čisté aj zaťažené podmienky
Incidin Plus	2,00%	15 min	čisté aj zaťažené podmienky
Incidin Rapid	0,25%	1 hod	čisté aj zaťažené podmienky
Incidin Rapid	0,50%	15 min	čisté podmienky
Incidin Rapid	0,50%	30 min	zaťažené podmienky
Incidin Rapid	0,75%	5 min	čisté podmienky
Incidin Rapid	1,00%	5 min	zaťažené podmienky
Incidin Pro	0,50%	30 min	čisté aj zaťažené podmienky
Incidin Pro	1,00%	15 min	čisté aj zaťažené podmienky



Balenie : 6 × 99utierok