



B. BRAUN WIPES ZÁSOBNÍ SYSTÉM

FLEXIBILNÍ A PRAKTICKÉ POUŽITÍ

PLNĚNÍ


ZÁSOBNÍHO SYSTÉMU B. BRAUN WIPES



Náš zásobní systém je dodáván v čistém stavu. Čištění a dezinfekce před prvním použitím se neprovádí. Opakovaně plňte pouze zcela suchý, vydezinfikovaný, vyčištěný a nepoškozený zásobník. Pokud by došlo k znečištění např. prachem při skladování nebo transportu, doporučujeme čištění a dezinfekci zásobního systému podle následujícího návodu. Během plnění používejte rukavice a pokud je třeba i ochranné brýle.



Vyjměte flísovou roli z obalu a vložte ji do zásobníku. Vytáhněte jednu utěrku z prostředka role. Připravte čerstvý zásobní roztok podle návodu výrobce dezinfekčního prostředku.

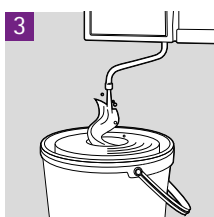

Kruhovým pohybem nalijte zásobní roztok na roli od středu k okrajům tak, aby bylo zajištěno stejnoměrné namočení. Doporučené množství zásobního roztoku je uvedeno na každém zásobníku (dóza nebo kbelík). Flísová role je zcela promočena po 10 minutách.¹



Protáhněte první povytaženou utěrku otvorem ve víku zásobníku. Pevně přitlačte víko, až zaklapne a vyhodte první utěrku. Uzavřete ochranné víčko. Víčko je bezpečně uzavřeno, když je zaklapnutí slyšitelné.



Vyplňte kompletně štítek a nalepte jej na viditelné místo na zásobníku.

Použitelnost vlhčených utěrek je 28 dní.

Více informací na informačních listech produktů.

¹ Více informací o minimálních koncentracích dezinfekčních roztoků můžete nalézt v tabulce „Kompatibilní čisticí a dezinfekční prostředky“ na str. 4. Zásobní roztoky musí být manuálně čerstvě připraveny v čisté a suché nádobě podle návodu výrobce.

PŘÍPRAVA A OPAKOVANÉ PLNĚNÍ

ZÁSObNÍHO SYSTÉMU B. BRAUN WIPES

Jsou-li utěrky vyčerpány, nebo dosáhne-li pracovní roztok data expirace, je třeba zásobník znovu naplnit. Před plněním zásobníku se musí provést manuální vyčištění a dezinfekce zásobníku včetně víka a otvoru (buď vypláchnutím teplou vodou 50 – 60 °C, nebo vytřením ubrouskem vlhčeným vhodným přípravkem). Alternativně je možné i strojní mytí a dezinfekce. Pro přípravu zásobního systému B. Braun WIPES doporučujeme manuální čištění a dezinfekci podle postupu níže.




Navlékněte si rukavice, pokud je to potřeba. Pro čištění a dezinfekci zásobního systému B. Braun WIPES doporučujeme použít Meliseptol® rapid a/nebo Meliseptol® HBV ubrousky.



Zásobník důkladně vyčistěte, zlikvidujte zbývající utěrky a dezinfekční roztok. Otřete celý povrch (kbelík, víko, otvor) pomocí vhodných ubrousků neuvolňujících vlákna namočených v alkoholovém dezinfekčním prostředku nebo předvlhčených ubrousků.



Před dezinfekcí musí být zásobník suchý a vizuálně čistý. Pro dezinfekci celého povrchu (kbelík, víko, otvor) použijte buď vhodné ubrousky neuvolňující vlákna namočené v alkoholovém dezinfekčním roztoku nebo předvlhčené ubrousky. Expozice dezinfekčního prostředku je nutno dodržet.

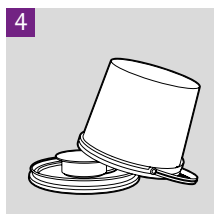

Nakonec, nechte všechny části před dalším použitím zcela uschnout. Následně může být zásobní systém znovu naplněn tak, jak je uvedeno na předešlé stránce.



B. BRAUN WIPES

UTĚRKY NA ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCI V NEMOCNICÍCH,
ZDRAVOTNÍCH CENTRECH A PEČOVATELSKÝCH DOMECH



B. Braun WIPES / WIPES mini

- Ochranné víčko se slyšitelným zaklapnutím
- Ubrousky gramáže 65 g/m²
- Vysoká pevnost v tahu a křížově tkaná struktura
- Mini-utěrky jsou jednou přeložené
- B. Braun WIPES 100 ks
- B. Braun WIPES mini 25 ks

B. Braun WIPES ECO / WIPES ECO mini

- Ochranné víčko se slyšitelným zaklapnutím
- Ubrousky gramáže 50 g/m²
- Vysoká pevnost v tahu a směrově tkaná struktura
- Šetrné k životnímu prostředí, o 20% méně materiálu
- B. Braun WIPES ECO 120 ks
- B. Braun WIPES ECO mini 60 ks

Kompatibilita s přípravky B. Braun	Minimální koncentrace
Hexaquant® pure	0,5 %
Hexaquant® XL	0,5 %
Melsept® SF	0,5 %*; 1,0 %*
Melsept® SF	2%
Meliseptol® rapid	konc.
Meliseptol® Foam pure	konc.
Meliseptol® New Formula	konc.
Ethanol 70% denat.	konc.
Ethanol 80% denat.	konc.

* Ověřená použitelnost roztoků 0,5% a 1% do 14 dnů s B. Braun WIPES / B. Braun WIPES mini.
Použití s B. Braun WIPES ECO / B. Braun WIPES ECO mini 28 dní.

Zásobní systém B. Braun WIPES / WIPES mini	Katalogové číslo
B. Braun WIPES - zásobník na utěrky se šedivým víčkem (bez flísové role)	19873
B. Braun WIPES - role flísových utěrek 100 ks	19164
B. Braun WIPES ECO - role flísových utěrek 120 ks	19726
B. Braun WIPES mini - zásobník na utěrky mini se šedivým víčkem (bez flísové role)	19874
B. Braun WIPES mini - role flísových utěrek 25 ks	19183
B. Braun WIPES ECO mini - role flísových utěrek 60 ks	19725

B. Braun Medical s.r.o. | Divize OPM | V Parku 2335/20 | 148 00 Praha 4 | Česká republika
Tel. +420-271 091 111 | info@bbraun.cz | www.bbraun.cz