

Čistenie SPIDER2

1. Odstráňte všetky súčasti a príslušenstvo na jedno použitie. Jednorazové komponenty zlikvidujte. Pozrite si pokyny na čistenie a sterilizáciu príslušenstva: 79-99-04 Pokyny na čistenie a sterilizáciu.
2. Utrite celý SPIDER2 jemným čistiacim/dezinfekčným prostriedkom, pričom dbajte na to, aby sa tekutina nedostala pod fóliu pedálu alebo do zásuvky pre pedál.
3. Batériu utrite jemným čistiacim/dezinfekčným prostriedkom.
4. Osušte SPIDER2 handričkou alebo ho nechajte voľne uschnúť na vzduchu.
5. NEPONÁRAJTE žiadnu časť SPIDER2 do tekutiny. Ak sa do zariadenia vlhkosť dostane, môže spôsobiť koróziu a poškodiť elektrické a/alebo mechanické komponenty.
6. NEAUTOKLÁVUJTE SPIDER2.
7. NEPOUŽÍVAJTE na sterilizáciu SPIDER2 etylénoxid.




Skladovanie

1. Vypnite a ZNÍŽTE TLAK v SPIDER2 odpojením nožného pedála a/alebo fólie pedálu a stlačením hlavného vypínača do polohy ZNÍŽIŤ TLAK na 1 sekundu (obrázok 2). Vypínač sa potom vráti do polohy VYP/SKLADOVANIE.
2. Keď sa SPIDER2 nepoužíva, vždy zariadenie odtlačte a potom vypnite. Ak tak neurobite, zníži sa životnosť zariadenia.

Údržba

Údržbu SPIDER2 by mali vykonávať iba vyškolení jednotlivci. Kontaktujte Smith & Nephew, aby sa zistilo, akú údržbu možno vykonať priamo na mieste

SPIDER2 Špecifikácie*

Model	REF: 72203299 SPIDER2	
Veľkosť (plne vysunutý)	Dĺžka: 1495 mm Šírka: 180 mm Výška: 200 mm	
Váha	13,6 kg [30 lbs] (s nainštalovanou batériou)	
Schválil	CSA International CAN/CSA-C22.2 No.601.1-M90 UL 60601-1 IEC 60601-1	
		
Typ zariadenia 	Typ B aplikovaná súčasť	
Napájanie	Vnútorné napájanie 24V - 15A	
Typ batérie	NiCd 24V 1.8Ah	
Model batérie	REF 72203301 SPIDER2 Battery Pack	
Ochranný kryt	IPX1 Odolné voči zatečeniu	
Podmienky prostredia	Prevádzka	Skladovanie & Preprava
Teplota	10°C - 40°C	-40°C - 70°C
Relatívna vlhkosť	30% - 75%	10% - 100%
Atmosférický tlak	70kPa - 106kPa	50kPa - 106kPa
Likvidácia 	EU: Nie pre bežný odpad Kontaktujte Smith & Nephew ohľadom vhodnej metódy likvidácie.	
*Špecifikácie sú približné a môžu sa meniť v rámci jednotlivých jednotiek alebo v dôsledku kolísania napájania.		

SPIDER2 Špecifikácia nabíjačky batérie

Schválil	Intertek CAN/CSA Std C22.2 No. 60950-1 UL 60950-1 IEC 60950-1
Napájanie	100-240 VAC, 50-60 Hz, Max 0.9 A

Informácie pre objednanie

SPIDER2 Príslušenstvo*

REF	popis
72203301	SPIDER2 Súprava batérie
7210570	Piggy Back konektor
7210749	90° konektor
7210577	Trakčné príslušenstvo
7210571	Spojovacia tyč pre rameno
7210576	Laterálna spojovacia tyč pre rameno
7210572	Spojovacia tyč pre lakeť
72200660	Príslušenstvo na artroskopiю zápästia
72202932	Príslušenstvo na artroskopiю členku
72203235	SPIDER príslušenstvo pre nohu (Ľavá)
72203236	SPIDER príslušenstvo pre nohu (Pravá)
72203239	3D SPIDER konektor

* Balenie SPIDER2 obsahuje:

- (1) SPIDER2
- (1) SPIDER2 Súpravu batérie
- (1) SPIDER2 Nabíjačku batérie
- (3) Káble napájania (Typ A - NEMA 1-15, Typ C - CEE 7/16 Eurozástrčka, Typ G - BS 1363). Kontaktujte Smith & Nephew pre ďalšie napájacie káble, ak je to potrebné.

Stabilizačné súpravy

72203833	SPIDER2 Stabilizačná súprava pre rameno
7210573	Stabilizačná súprava pre rameno
7210574	Stabilizačná súprava pre lakeť
72201550	Stabilizačná súprava pre zápästie - malá
72201551	Stabilizačná súprava pre zápästie - stredná
72201552	Stabilizačná súprava pre zápästie - veľká
72202931	Stabilizačná súprava pre členok
72203238	Stabilizačná súprava pre nohu
72203300	Fólia pedálu

Záruka

Na tento product sa vzťahuje štandardná 12-mesačná na diely a výrobné vady.

Ďalšie informácie

Pokiaľ potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte zákaznický servis Smith & Nephew +1 800 343 5717 v USA alebo autorizovaného obchodného zástupcu.