

Čistenie SPIDER2

1. Odstráňte všetky súčasti a príslušenstvo na jedno použitie. Jednorazové komponenty zlikvidujte. Pozrite si pokyny na čistenie a sterilizáciu príslušenstva: 79-99-04 Pokyny na čistenie a sterilizáciu.
2. Utrite celý SPIDER2 jemným čistiacim/dezinfekčným prostriedkom, pričom dbajte na to, aby sa tekutina nedostala pod fóliu pedálu alebo do zásuvky pre pedál.
3. Batériu utrite jemným čistiacim/dezinfekčným prostriedkom.
4. Osušte SPIDER2 handričkou alebo ho nechajte voľne uschnúť na vzduchu.
5. NEPONÁRAJTE žiadnu časť SPIDER2 do tekutiny. Ak sa do zariadenia vlhkosť dostane, môže spôsobiť koróziu a poškodiť elektrické a/alebo mechanické komponenty.
6. NEAUTOKLÁVUJTE SPIDER2.
7. NEPOUŽÍVAJTE na sterilizáciu SPIDER2 etylénoxid.

Skladovanie

1. Vypnite a ZNÍŽTE TLAK v SPIDER2 odpojením nožného pedála a/alebo fólie pedálu a stlačením hlavného vypínača do polohy ZNÍŽIŤ TLAK na 1 sekundu (obrázok 2). Vypínač sa potom vráti do polohy VYP/SKLADOVANIE.
2. Keď sa SPIDER2 nepoužíva, vždy zariadenie odtlačte a potom vypnite. Ak tak neurobíte, zníži sa životnosť zariadenia.

Údržba

Údržbu SPIDER2 by mali vykonávať iba vyškolení jednotlivci. Kontaktujte Smith & Nephew, aby sa zistilo, akú údržbu možno vykonať priamo na mieste

SPIDER2 Špecifikácie*

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Model | REF: 72203299 SPIDER2 | |
| Veľkosť (plne vysunutý) | Dĺžka: 1495 mm Šírka: 180 mm Výška: 200 mm | |
| Váha | 13,6 kg [30 lbs] (s nainštalovanou batériou) | |
| Schválil | CSA International CAN/CSA-C22.2 No.601.1-M90 UL 60601-1 IEC 60601-1 | |
| Typ zariadenia | Typ B aplikovaná súčasť | |
| Napájanie | Vnútorné napájanie 24V - 15A | |
| Typ batérie | NiCd 24V 1.8Ah | |
| Model batérie | REF 72203301 SPIDER2 Battery Pack | |
| Ochranný kryt | IPX1 Odolné voči zatečeniu | |
| Podmienky prostredia | Prevádzka | Skladovanie & Preprava |
| Teplota | 10°C - 40°C | -40°C - 70°C |
| Relatívna vlhkosť | 30% - 75% | 10% - 100% |
| Atmosférický tlak | 70kPa - 106kPa | 50kPa - 106kPa |
| Likvidácia | EU: Nie pre bežný odpad Kontaktujte Smith & Nephew ohľadom vhodnej metódy likvidácie. | |
| *Špecifikácie sú približné a môžu sa meniť v rámci jednotlivých jednotiek alebo v dôsledku kolísania napájania. | | |

SPIDER2 Špecifikácia nabíjačky batérie

| | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| Schválil | Intertek CAN/CSA Std C22.2 No. 60950-1 UL 60950-1 IEC 60950-1 |
| Napájanie | 100-240 VAC, 50-60 Hz, Max 0.9 A |

Informácie pre objednanie

SPIDER2 Príslušenstvo*

| REF | popis |
|----------|---------------------------------------|
| 72203301 | SPIDER2 Súprava batérie |
| 7210570 | Piggy Back konektor |
| 7210749 | 90° konektor |
| 7210577 | Trakčné príslušenstvo |
| 7210571 | Spojovacia tyč pre rameno |
| 7210576 | Laterálna spojovacia tyč pre rameno |
| 7210572 | Spojovacia tyč pre lakeť |
| 72200660 | Príslušenstvo na artroskopiú zápästia |
| 72202932 | Príslušenstvo na artroskopiú členku |
| 72203235 | SPIDER príslušenstvo pre nohu (Ľavá) |
| 72203236 | SPIDER príslušenstvo pre nohu (Pravá) |
| 72203239 | 3D SPIDER konektor |

* Balenie SPIDER2 obsahuje:

- (1) SPIDER2
- (1) SPIDER2 Súpravu batérie
- (1) SPIDER2 Nabíjačku batérie
- (3) Káble napájania (Typ A - NEMA 1-15, Typ C - CEE 7/16 Eurozástrčka, Typ G - BS 1363). Kontaktujte Smith & Nephew pre ďalšie napájacie káble, ak je to potrebné.

Stabilizačné súpravy

| | |
|----------|---------------------------------------------|
| 72203833 | SPIDER2 Stabilizačná súprava pre rameno |
| 7210573 | Stabilizačná súprava pre rameno |
| 7210574 | Stabilizačná súprava pre lakeť |
| 72201550 | Stabilizačná súprava pre zápästie - malá |
| 72201551 | Stabilizačná súprava pre zápästie - stredná |
| 72201552 | Stabilizačná súprava pre zápästie - veľká |
| 72202931 | Stabilizačná súprava pre členok |
| 72203238 | Stabilizačná súprava pre nohu |
| 72203300 | Fólia pedálu |

Záruka

Na tento product sa vzťahuje štandardná 12-mesačná na diely a výrobné vady.

Ďalšie informácie

Pokiaľ potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte zákaznický servis Smith & Nephew +1 800 343 5717 v USA alebo autorizovaného obchodného zástupcu.